

AQUARIST

アルカリイオン水生成器 アクアリスト ND-115

理想の「水」を追求しました。



本器は医療用物質生成器として認可(医療用具承認番号20900BZZ00897000)を受けており、以下の効能・効果が認められています。

〈効能・効果〉

●アルカリイオン水/飲用して慢性下痢・消化不良・(陰極水) 胃腸内異常発酵・制酸・胃酸過多に有効である。

●酸性水/弱酸性のアストリンゼント(化粧水)として美容用に用いられる。(陽極水)

NICHIDEN

AQUARIST 誕生

アルカリイオン水生成器 アクアリスト ND-115

胃腸のために アルカリイオン水

アルカリイオン水は、
消化不良や胃酸過多、制酸、慢性下痢、
胃腸内異常発酵に効果があります。

他にもこんな使い方
お茶、コーヒー、炊飯、
煮物、野菜のアク抜き、
ウイスキーや焼酎の水割り



肌のために 酸性水

酸性水には、肌をひきしめる
アストリンゼント効果があるので、
美容にお使いください。

他にもこんな使い方
めん類のゆで水、野菜洗い、
てんぶらの衣づくり、ゆで卵




未来の「水」を提案します。



清潔さと安全性にこだわりました。

洗浄表示ランプ(マイコン制御)：電解槽の洗浄中に点灯します。電解水を出し終わる度に洗浄され、洗浄終了後消灯します。

休止中ランプ(安全装置作動ランプ・自動復帰型温度センサー採用)：本体内の温度が高すぎる時点灯します。点灯中は電解を停止していますので、ランプが消えるのを待って使用してください。

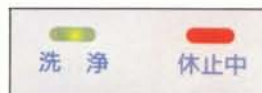

操作の簡単な親切設計です。

酸・アルカリ切り替えスイッチ：酸性水を使用する時に切り替えます。酸性水を取水し終えて水が止まると、自動的にアルカリに復帰します。

※通水中は切り替えませんので、水が止まっている状態でスイッチを押してください。

pHレンジ設定スイッチ：電解の強度を切り替えます。付属のpH試験液で、pH9～9.5程度を目安に設定してください。

pHレンジ表示ランプ(ワンタッチ切り替え)：お好みの水質がお選びいただけるように、pH強度(5段階)調節が付いています。

※pHの数値を表すものではありません。

通水量表示ランプ(流量センサー採用)：設定レンジに適した水量の時に標準が点灯します。水量が多すぎる時は「多」、不足の時は「少」が点灯します。


メロディーランプ：点灯時、酸性に切り替え通水するとメロディーが流れます。



カートリッジの交換時期を一目でお知らせします。

カートリッジ交換ランプ(流量センサー採用)：浄水カートリッジの交換時期が近づくと点滅し、交換時期になると点灯して知らせます。

※交換時期は浄水器基準に基づいて設定しています。水道の水質(配管の錆、汚れ、水不足の影響等)により寿命が短くなることがあります。水の出が悪くなったり、異臭を感じる時は交換ランプ点灯を待たずに、早めの交換をしてください。

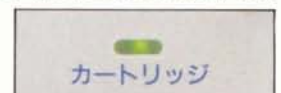

アクアリストの構造





AQUARIST

— アルカリイオン水生成器 アクアリスト ND-115 —

給水仕様：吐水蛇口分岐式（Uターン方式）
 給水接続：分岐水栓セット（オプション有）
 電源電圧：AC100V/50Hz、60Hz
 消費電力：約160W
 本体：〈寸法〉幅240×高さ290×奥行き115（mm）
 〈重量〉約5kg
 構成：据置き・壁掛け兼用・浄水器内蔵
 操作方法：押ボタンスイッチ（電解強度・酸/アルカリ切換え）
 最高使用水温：約30度
 使用水道圧範囲：0.7～6kgf/cm²（圧カスリーブ使用）
 電解方式：連続式電解方式（流量センサー内蔵）
 電解：〈処理水量〉4.5～5ℓ/min（原水）
 〈電解能力切換〉5段階設定（浄水、弱～強）
 〈電解槽〉白金チタン電極
 〈電解洗浄〉オートクリーニング方式（マイコン制御

による全自動洗浄方式）（使用通水量に応じて洗浄する）
 浄水器：〈処理水量〉標準使用状態を1日40ℓとして約1年間（原水残留塩素濃度2PPMに対し0.4PPMに達するまでの水量）
 〈寿命表示〉流量積算により、14tで交換時期予告でLED点滅、積算15tでLED点灯する
 〈ろ過材料〉銀添粒状活性炭（残留塩素・カルキ臭・有機化合物・臭い除去）
 〈交換方式〉ワンタッチ交換システム
 カルシウム添加：強制溶解型添加方式、添加筒内蔵
 電源保護装置：ガラス管ヒューズ
 過電流検出：設定レンジ自動切換
 過昇温度保護装置：絶縁トランス温度センサー内蔵



標準小売価格 **128,000円**（消費税別途）
 取付工事費別途
 交換用浄水カートリッジ **8,500円**

- ご使用前には取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。
- 本製品は平成4年厚生省令第69号に適合する飲用可能な水道水を対象としています。
- 生成量は水圧が低い場合は減少します。
- 硬水を軟水に変えることはできません。
- 地域によって塩素除去能力に多少の差があります。
- 蛇口の形状によっては取り付けられない場合がありますので、お買い上げ前に販売店にお問い合わせください。
- カルシウム添加物は、当社指定の物をご使用ください。
- 本器は日本国内でのご使用ください。
- 仕様は改良のため予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
- 本製品には保証書を添付しております。お買い上げの際、記載内容をご確認いただき大切に保管してください。

＜使用上のご注意＞

安全の為、必ずお守りください。

- 初めて飲まれる方は、最初のうち低濃度のアルカリイオン水を少量からお飲みください。
- 次のような方は医師または薬剤師に相談してください。
 - 医薬品をアルカリイオン水で飲用される方。
 - 無酸症の方や、病気治療中の方。
 - 持病のある方、または身体の弱っている方。
 - 肝臓・腎臓に障害のある方。
 - 医師または歯科医師の治療を受けている方。
- 次の方は酸性水（アストリンゼント）を使用する前に医師または薬剤師に相談してください。
 - お肌の弱い方。
 - アレルギー体質の方。

お求め、お問い合わせは

株式会社ワイズカンパニー

神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰本町 2-1-3-6F

045-953-1724

<http://www.water-life.jp/>

製造元



株式会社

ニチデン